

ارسال نمونه خلط از آزمایشگاه سل محیطی به آزمایشگاه رفرانس سل کشوری




نمونه ها باید در لوله های فالکون ۵۰ ML جمع آوری شوند و درب آن به طور محکم بسته شود.

برای جلوگیری از نشت نمونه در هنگام حمل و نقل، درب لوله ها باید با پارافیلیم بسته شود.



نمونه ها باید سپس در ۲ تا ۳ دستمال کاغذی بسته بندی شود

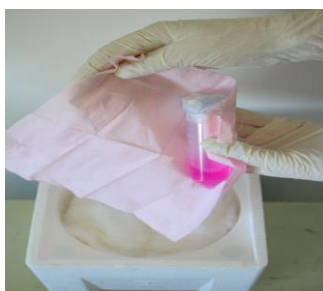

اکنون شما می توانید نمونه ها را در جعبه مخصوص انتقال قرار داده و آن را از طرق پست و یا بصورت شخصی ارسال کنید



به یاد داشته باشید که اداره پست باید از محتوای بسته شما آگاه باشد.

برای این منظور باید جمله زیر روی بسته های ارسالی نوشته شود.

